


Votre guide rapide d'utilisation NovoPen® 6 et NovoPen Echo® Plus

Vos stylos à insuline connectés.
Où que vous soyez.

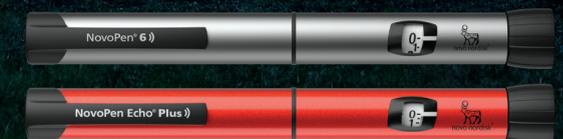

NovoPen® 6))
NovoPen Echo® Plus))



Ceci est un guide rapide. Veuillez consulter le mode d'emploi fourni avec NovoPen® 6 ou NovoPen Echo® Plus pour obtenir plus d'informations.¹

Préparez votre NovoPen® 6 ou NovoPen Echo® Plus




Insérez une cartouche d'insuline

Retirez le capuchon du stylo. Dévissez le porte-cartouche. Il est possible que la tige du piston dépasse de votre stylo. Si c'est le cas, poussez-la jusqu'à ce qu'elle s'immobilise.




Glissez une nouvelle cartouche d'insuline dans le porte-cartouche, extrémité fileté en premier. Revissez le porte-cartouche.

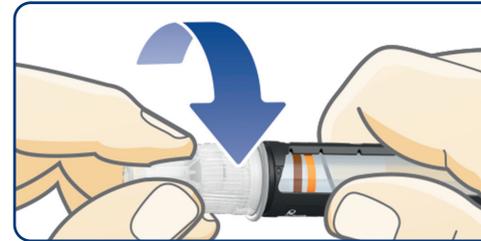

Fixez une nouvelle aiguille

Déchirez la languette en papier. Insérez l'aiguille directement sur le stylo. Tournez jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée. Retirez les deux capuchons d'aiguille. Mettez de côté le capuchon extérieur de l'aiguille.

Administrez votre injection

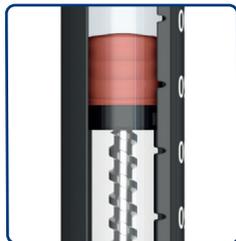

⚠ Testez TOUJOURS le débit d'insuline

Sélectionnez 2 unités et appuyez sur le bouton de dose jusqu'à ce que le compteur de dose indique 0. Le test de débit d'insuline est terminé lorsque vous voyez un jet d'insuline au bout de l'aiguille et qu'il n'y a plus d'espace entre la tête de la tige du piston et le piston.

Sélectionnez votre dose

Tirez sur le bouton de dose. Avant de commencer, assurez-vous que le compteur de doses indique 0. Tournez le bouton de dose pour sélectionner la dose dont vous avez besoin.



Attendez et comptez lentement
1-2-3-4-5-6

Injectez-vous votre dose


Insérez l'aiguille en accord avec les recommandations relatives au produit à injecter. Appuyez sur le bouton de dose jusqu'à ce que le compteur de dose indique 0. Comptez lentement jusqu'à 6 avant de retirer l'aiguille de votre peau. Retirez et jetez l'aiguille dans le respect des règles de sécurité. Remettez le capuchon sur votre stylo.

Comment vérifier votre dernière dose



Tirez sur le bouton de dose

Avant de commencer, assurez-vous que le compteur de doses indique 0.

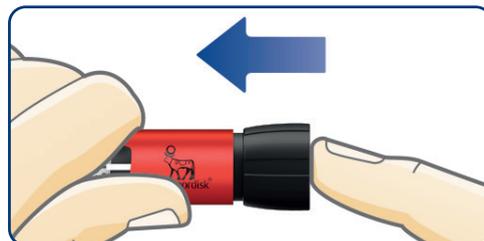

Enfoncez le bouton de dose

La mémoire des doses affiche maintenant les détails de votre dernière dose.



Lisez votre mémoire des doses

Sur l'exemple ci-dessus, 12 unités ont été injectées il y a 1 heure, 52 minutes et 3 secondes.

Tenez un journal personnel de vos injections

Si vous avez un smartphone, une tablette, un ordinateur personnel, un lecteur de glycémie ou tout autre appareil permettant une communication NFC (Near Field Communication), il vous sera facile de transférer les données de votre injection d'insuline de votre stylo vers votre appareil. Assurez-vous simplement de télécharger une application compatible capable de lire et d'afficher ces informations.



Découvrez tous les avantages des nouveaux stylos d'insuline connectés

NovoPen® 6 et NovoPen Echo® Plus sont destinés aux patients à qui une insuline en cartouche de Novo Nordisk a été prescrite.

NovoPen® 6 permet d'injecter une dose maximale de 60 unités par paliers de 1 unité.

NovoPen Echo® Plus permet d'injecter une dose maximale de 30 unités par paliers de 0,5 unité.