

NovoPen® 6 et NovoPen Echo® Plus sont-ils compatibles avec mon smartphone ?



Pour le savoir :

Si la réponse aux 3 questions suivantes est oui, votre smartphone est compatible avec NovoPen® 6 et NovoPen Echo® Plus :

- ✓ Votre smartphone dispose-t-il d'une interface NFC (Near Field Communication) ?
- ✓ Le système d'exploitation de votre smartphone est-il compatible ?
- ✓ L'application que vous préférez est-elle prise en charge par le système d'exploitation de votre smartphone ?


L'interface NFC est située à un emplacement différent sur votre smartphone en fonction du modèle. Voici quelques exemples.



iPhone X, XS, XS Max, XR, 11, 11 Pro Max, Pro, SE, 12



Galaxy S7 Edge, S8, S8+, S9, S10, S20, S21

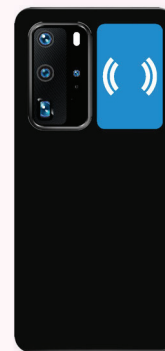

Huawei P10 Lite, P20, P30 Pro, P40 Pro

Les caractéristiques individuelles de votre smartphone se trouvent dans le manuel d'utilisation ou vous pouvez les demander à votre magasin de smartphones.

Les systèmes d'exploitation suivants sont compatibles

	Modèles	Systemes d'exploitation
	iPhone 8, 8 Plus, X, XS, XS Max, XR, 11, 11 Pro Max, Pro, SE, 12	iOS 13 et versions ultérieures
	Galaxy S7 Edge, S8, S8+, S9, S10, S20, S21	Android : 8, 9, 10, 11
	Pixel, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3	Android : 8, 9, 10
	Nexus 5X	Android : 8
	P10 Lite, P20, P30 Pro, P40 Pro	Android : 8, 9, 10

Ces smartphones sont connus pour présenter des problèmes de compatibilité :

- Samsung Galaxy S6 (les modèles Galaxy S6 ne fonctionneront pas tous avec NovoPen® 6)
- iPhone 7 : iOS 14.4.2 ne parvient pas à transférer les données si un enregistrement de dose complet doit être téléchargé

Comment trouver la bonne app pour votre smartphone

Veuillez contacter le développeur de votre app de préférence pour l'utilisation de NovoPen® 6 et NovoPen Echo® Plus afin d'obtenir un résumé des smartphones compatibles ou scanner le QR code ci-dessous pour obtenir plus d'info.

